



1 แทะ Anscare ออกมาทีละดวง



2 ใช้มือซ้ายจับวัสดุโดยให้มือชิดขอบบนเส้นประมากที่สุด มือขวาจับกระดาษ จากนั้นฉีกแบ่ง โดยการกดมือขวาลง



3 จะเห็นว่า Anscare ติดอยู่บนกระดาษด้านซ้ายมือ



4 มือขวาอย่าเพิ่งทิ้งกระดาษ โดยนำมาแปะกลับที่เดิม



5 นำ Anscare ติดกระดาษด้านขวาแล้ว ลอกออกจากกระดาษด้านซ้าย (ที่ยังติดแน่นอยู่)



6 นำ Anscare มาปิดบนแผลเลเซอร์ (CO2) หรือสิ่ว



7 ใช้มือกดเบาๆ ประมาณ 3-5 วินาที เพื่อให้ Anscare ปิดแผลได้เรียบเนียน



8 ภาพหลังจากติด Anscare